



FICHE PRODUIT

CorTTape®

FIXED

SYSTÈME DE FIXATION CORTICALE
À BOUCLE NON-AJUSTABLE
POUR LA RECONSTRUCTION DU LCA



Produit livré dans un double emballage
et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène.
Ne pas restériliser.

Descriptif du produit

Le dispositif est composé de :

- Deux fils de traction non-résorbables en polyester (1 bleu/blanc et 1 blanc),
- Une boucle continue blanche tressée en polyéthylène de poids moléculaire très élevé (UHMWPE),
- Une plaque en titane (longueur : 12 mm, largeur : 4 mm, épaisseur : 1,5 mm, Ti-6Al-4V ELI).

Caractéristiques du produit

Plusieurs longueurs de boucle sont disponibles :
de 15 mm à 60 mm.

Indications

CorTTape® FIXED est indiqué pour la fixation d'os ou de tissu mou dans des procédures orthopédiques nécessitant une reconstruction de ligament ou de tendon.



CorTTape®

FIXED


SYSTÈME DE FIXATION CORTICALE
À BOUCLE NON-AJUSTABLE
POUR LA RECONSTRUCTION DU LCA

Choix de la longueur de boucle de CorTTape® FIXED

Calcul permettant de déterminer la longueur de la boucle :

Longueur totale du tunnel fémoral $-$ Longueur de la logette osseuse (on recommande 30 mm) $+$ 10 mm*
(toujours arrondir à une taille supérieure).

* les 10 mm supplémentaires sont nécessaires pour la bascule de la plaque.

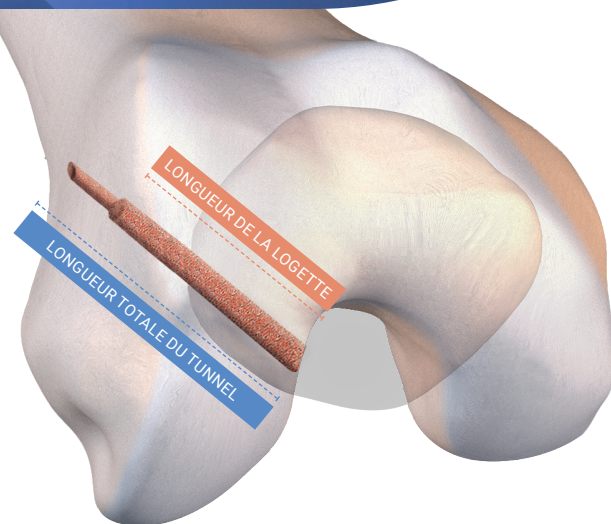

Exemple :

Longueur totale du tunnel 42 mm

$-$ Longueur de la logette fémorale 30 mm

$+$ 10 mm de bascule

$=$ 22 mm.

Choisir un Corttape® FIXED de 25 mm.

Longueur totale tunnel fémoral de diamètre 5 mm	40	45	50	55	60	65	70	75	80
CHOIX DU BOUTON Calcul de la longueur de boucle, bouton 15, 20, 25, 30, 35 + 10 mm de bascule	20	25	30	35	40	45	50	55	60

Réf. FH	Réf. fournisseur	Désignation
271 891	OBCL-15-Ti	CorTTape® FIXED 15 mm
271 892	OBCL-20-Ti	CorTTape® FIXED 20 mm
271 893	OBCL-25-Ti	CorTTape® FIXED 25 mm
271 894	OBCL-30-Ti	CorTTape® FIXED 30 mm
271 895	OBCL-35-Ti	CorTTape® FIXED 35 mm
271 896	OBCL-40-Ti	CorTTape® FIXED 40 mm
271 897	OBCL-45-Ti	CorTTape® FIXED 45 mm
271 898	OBCL-50-Ti	CorTTape® FIXED 50 mm
271 899	OBCL-55-Ti	CorTTape® FIXED 55 mm
271 900	OBCL-60-Ti	CorTTape® FIXED 60 mm

Date de modification document : janvier 2023 - **Fabricant :** Riverpoint - **Gamme :** Sport Surgery - **Nom du produit :** CorTTape FIXED - **Destinataire :** professionnels de santé - **N° du marquage CE :** CE0459
- **Classe du DM :** IIb - Remboursable par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr - **Indications :** les systèmes de fixation corticale servent à la fixation des tendons et des ligaments pendant les procédures de reconstruction orthopédique, par exemple, celle de reconstruction des ligaments croisés antérieurs (LCA). - **Recommandations d'utilisation :** il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit.



DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

GROUPE
FH ORTHO™

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fhortho.com
www.fhortho.com

USA, FH ORTHOPEDICS INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fhortho-us.com
www.fhortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fhortho.com