




CorTTape[®] screw


VIS BIORÉSORBABLE

CorTTape screw[®] est une vis d'interférence bio résorbable spécialement conçue pour les techniques chirurgicales de ligamentoplastie. Son design permet aussi bien la fixation de greffe de tendon rotulien que de greffe tendineuse.

PROFIL DE RÉSORPTION

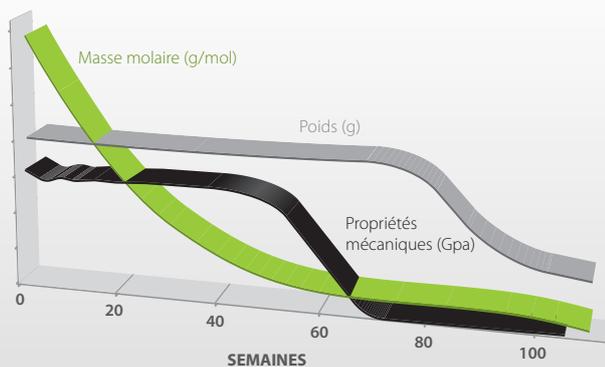

COUPLE DE TORSION ÉLEVÉ

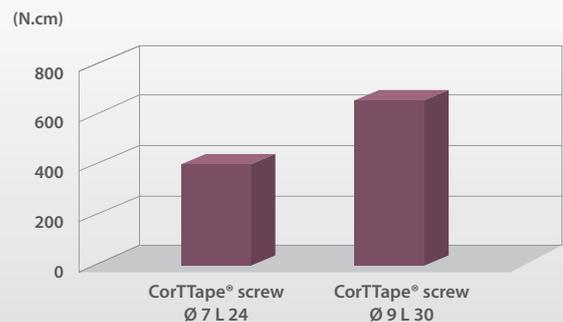

CARACTÉRISTIQUES



- Le **PLA** est un polymère synthétique bien connu qui se décompose par hydrolyse.
- Résistance à l'arrachement maximale : **1000 N.**
- Force de torsion maximale : **700 N cm.**

Résorption:

Les propriétés mécaniques sont stables pendant 8 à 10 mois postopératoires. La vis est totalement remplacée par de l'os sain après 4 ans.

Forme :

La vis présente une **extrémité pointue** pour une insertion rapide et efficace.

Filetage :

- Les filets sont **auto-taraudants.**
- Profondeur importante pour une interférence optimale.

PRODUIT

Chaque produit est conditionné sous double emballage stérile. Les produits sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène.

La vis doit être stockée dans son emballage original dans un endroit propre, sec et à une température inférieure à 37°.

Pour plus d'informations, se reporter à la notice d'utilisation.



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

L'utilisation d'une vis d'un diamètre trop important par rapport à celui du tunnel fémoral et/ou tibial peut : endommager la greffe, rendre l'insertion de la vis impossible et même entraîner la rupture de la vis. Il est recommandé d'utiliser une vis d'un diamètre inférieur ou égal (\leq) à celui du tunnel.

Aucun taraudage n'est nécessaire car il s'agit d'une vis autotaraudeuse.

RÉFÉRENCES

IMPLANTS

Réf.	Désignation
269 935	CorTTape vis 100% PLA D6 L24
269 936	CorTTape vis 100% PLA D7 L24
269 937	CorTTape vis 100% PLA D7 L30
269 938	CorTTape vis 100% PLA D8 L24
269 939	CorTTape vis 100% PLA D8 L30
269 940	CorTTape vis 100% PLA D9 L24
269 941	CorTTape vis 100% PLA D9 L30
269 942	CorTTape vis 100% PLA D10 L30
269 943	CorTTape vis 100% PLA D11 L35

INSTRUMENTS

Réf.	Désignation
267 558	Tournevis CorTTape screw
264 651	Broche pour vis CorTTape screw D1,2 L220 dans kit stérile réf. 267 482
265 761	Broche pour vis CorTTape screw D1 L300
271 242	Broche Nitinol pour vis CorTTape screw D1 L300

Date de création document : avril 2021 - **Fabricant :** Teknimed - **Gamme :** Sport Surgery - **Nom du produit :** CorTTape screw - **Destinataire :** professionnel de santé - **N° du marquage CE :** 2797 - **Classe du DM :** III - Remboursable par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site amel.fr - **Indications :** fixation ligamentaire dans les opérations de reconstruction du ligament croisé antérieur ou des ligaments latéraux de la cheville - **Recommandations d'utilisation :** il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit - **Sources :** essais résorption 2007 ; essais torsion 132/3/PE 2013.



DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

GROUPE
FH ORTHO™

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fortho.com
www.fortho.com

USA, FH ORTHOPEDICS INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fortho-us.com
www.fortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fortho.com