













## Instruments a usage unique : tableau des utilisations

Réf.	Fraises MIS (boîte de 5)	Utilisations
<b>OSTÉOTOMIES</b>		
	<b>256 016</b> Fraise Wedge 3,1 x 13 mm MIS	Ostéotomie métatarsienne avec grande correction (10 à 20°). Égaliser et désépaissir un os plus fragile ; parfaire le ponçage dans certains cas.
	<b>256 018</b> Fraise Shannon droite 2,0 x 12 mm MIS	Ostéotomie de M1 ou P1 (Akin), en 1 <sup>ère</sup> intention, correction d'angle neutre - faible < 10°.
	<b>256 019</b> Fraise Shannon courte 2,0 x 08 mm MIS	Tous gestes osseux sur petits orteils (R2 à R3) : griffe d'orteils, crosse, clinodactylie, raccourcissement, oeil de perdrix.
	<b>256 020</b> Fraise Shannon longue 2,0 x 12 mm MIS	Ostéotomie de M1 ou P1 plus importante (10°) - DMMO (Distal Metatarsal Mini invasive Osteotomy) - Désépaississement des têtes métatarsiennes (R2 à R5).
	<b>258 156</b> Fraise chevron percutanée 3,0 x 20 mm MIS II	Ostéotomie chevron percutanée longue avec effet raccourcissant +.
	<b>258 157</b> Fraise chevron percutanée 2,5 x 14 mm MIS II	Ostéotomie chevron percutanée courte sans effet raccourcissant marqué.
	<b>264 425</b> Fraise chevron percutanée 2,0 x 20 mm MIS II	Ostéotomie chevron percutanée longue sans effet raccourcissant marqué.
<b>RÉSECTION OSSEUSE</b>		
	<b>256 017</b> Fraise Wedge extra 4,1 x 13 mm MIS	Égaliser et désépaissir (partie médiale de la tête de M1) en 1 <sup>ère</sup> intention ; chéilectomie des Hallux Rigidus
<b>INCISION</b>		
	<b>266 510</b> Lame arrondie 3 mm bePOD Swann Morton SM64 (boîte de 25)	Incision 3 mm/Artholyse/Ténotomy.
	<b>268 147</b> Lame pointue 3 mm bePOD Swann Morton SM67 (boîte de 20)	Incision 3 mm/Artholyse/Ténotomy.

Date de modification document : février 2024 - Fabricants : Beaver BVI (lames), FH Industrie (fraises) - Gamme : Pied, bePOD - Nom du produit : Lames Beaver, Fraises MIS - Destinataire : professionnels de santé - Marquage CE : 0459 - Classe du DM : I (lames), IIa (fraises) - Indications : ostéotomie MIS du pied - Recommandations d'utilisation : il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit



**DISTRIBUTEURS**  
DISTRIBUTORS



**FABRICANT**  
MANUFACTURER

GRUPE  
**FH ORTHO™**

**FR, FH ORTHO SAS**  
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle  
BP 50009  
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE  
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92  
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11  
info@fhortho.com  
www.fhortho.com

**USA, FH ORTHOPEDICS INC.**  
OrthoEx  
7327 E Tierra Buena Lane  
Scottsdale, Arizona 85260 - USA  
Phone: +1 (412) 965-0950  
customerservice@fhortho-us.com  
www.fhortho.com

**PL, FH ORTHO POLSKA**  
Ul. Garbary 95/A6,  
61-757 Poznan - POLSKA  
Phone: +48 61 863 81 27  
Fax: +48 61 863 81 28  
biuro@implants24.pl  
www.fhortho.com

**FR, FH INDUSTRIE**  
6 rue Nobel, Z.I. de Kernevez  
29000 QUIMPER - FRANCE  
Tél. +33 (0)2 98 55 68 95  
Fax : +33 (0)2 98 53 42 13  
contact-fhi@fhortho.com  
www.fhortho.com