


Protocole de réalisation de guides de coupe sur mesure

Onlyyou[®]
FHK[®]

Les guides de coupe **Only you**[®] pour la prothèse totale de genou **FHK**[®] font partie d'une approche personnalisée et d'une planification 3D de la chirurgie de chaque patient, basée sur scanner ou IRM.

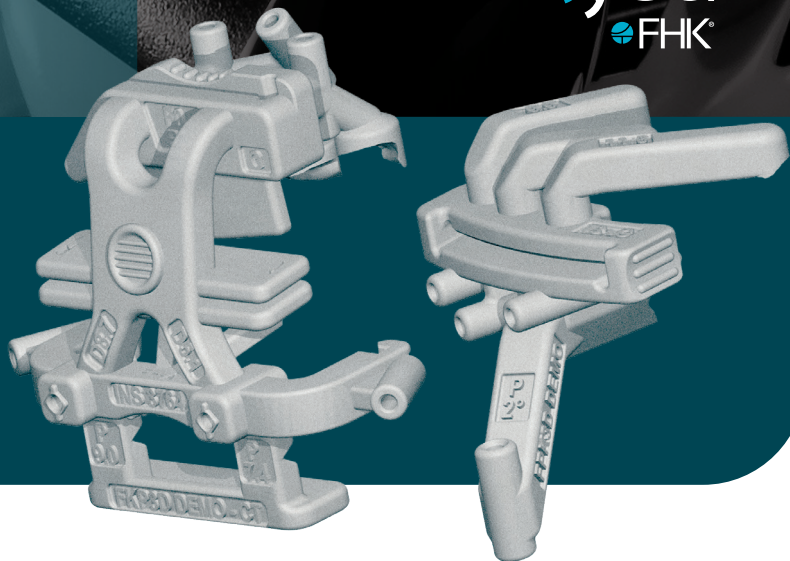

DÉTAIL DE LA PROCÉDURE

Prescription d'un scanner ou d'une IRM du genou.

Réalisation de la procédure radiologique selon protocole spécifique.

- Délai 4 semaines -

- Envoi des images au GROUPE FH ORTHO,
- Traitement des données et mise en ligne des images de chaque patient sur le site de planification **Only you**[®] : <https://fhortho.digitalsolutions.app>
- Planification réalisée par le chirurgien,
- Livraison des guides de coupe à l'établissement, propres et prêts à être stérilisés (conditionnement sous double sachet médical), ainsi que le modèle 3D du genou du patient,
- Réalisation de l'intervention chirurgicale.

Les examens **Only you**[®] peuvent être stockés sur CD ou DVD. Une étiquette doit y être appliquée, comprenant le nom du chirurgien, l'identification du patient, le côté de la chirurgie, la date d'acquisition et la date de l'intervention.

Les supports de stockage peuvent être postés à l'adresse suivante :

GROUPE
FH ORTHO[™]



3 rue de la Forêt
BP 50009
68990 HEIMSBRUNN CEDEX

En cas de problème, veuillez nous contacter au : 03 89 81 90 92

PLANNING OPÉRATOIRE INTERACTIF 3D CONÇU PAR VOUS

Tous les dossiers des patients sont regroupés dans un espace personnel et sécurisé accessible par internet, uniquement par le chirurgien, à tout moment et partout.

Pour chaque cas, le chirurgien retrouve toutes les mesures pré-opératoires de son patient et peut modifier tous les paramètres de la chirurgie :

Sur le fémur : niveaux de coupes distales et postérieures, rotation fémorale externe, valgus fémoral...

Sur le tibia : niveau de résection, pente tibiale, rotation des implants, varus/valgus.




Le chirurgien peut personnaliser son espace de planification en paramétrant ses préférences chirurgicales et son interface graphique.

RÉFÉRENCES

Réf.	Désignation
K-TKA-01-FHO	Kit Only You [®] FHK scanner avec fantôme
K-TKA-07-FHO	Kit Only You [®] FHK IRM avec fantôme
K-TKA-PLANIFICATION-FHO	Planification 3D Knee FHO

Pour tout guide de coupes personnalisé, une planification est obligatoire.

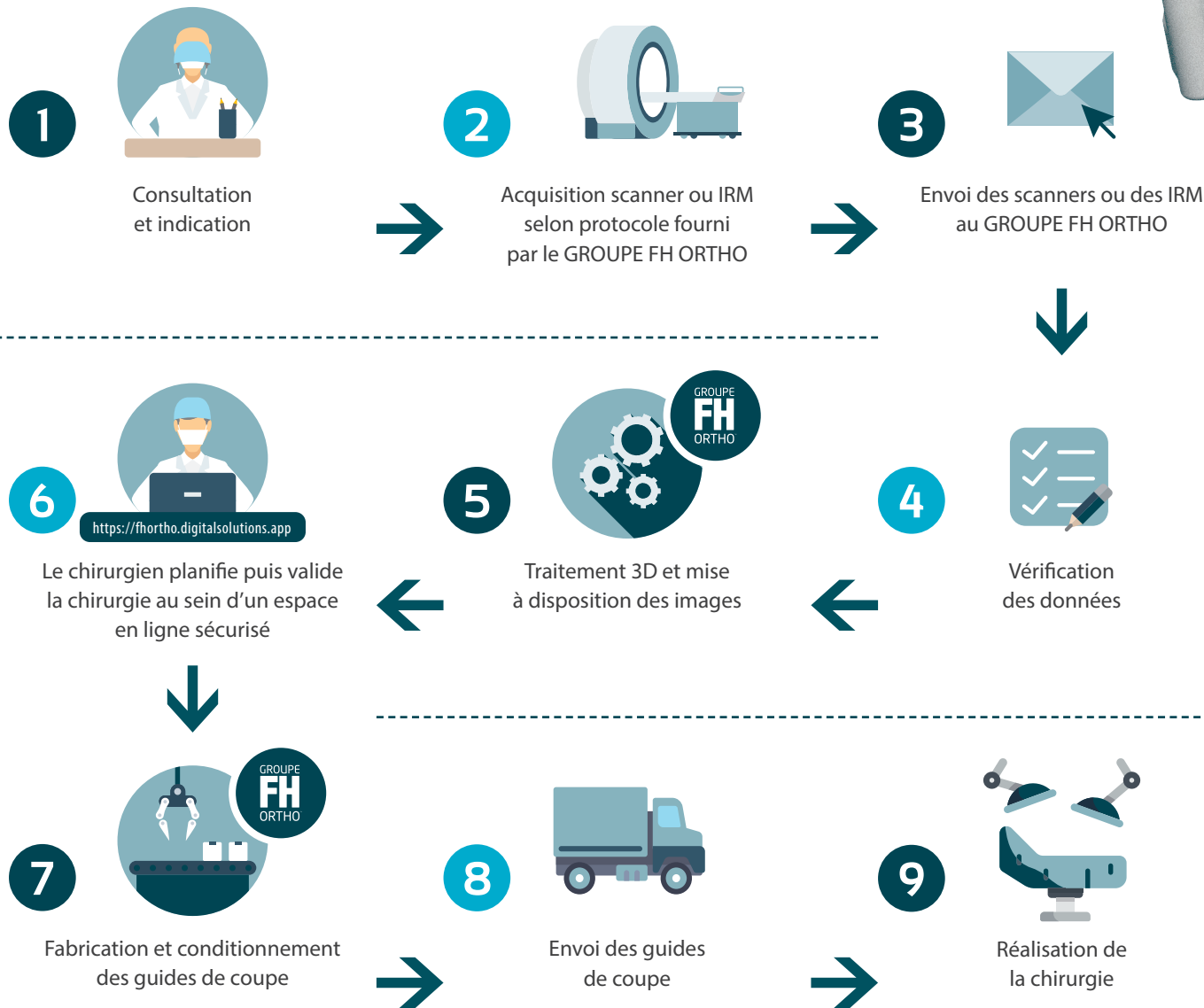

4 semaines sont nécessaires entre l'acquisition des images et l'intervention chirurgicale, si la validation des données est faite sans délai.

À chaque étape, **un email est envoyé au chirurgien** pour le tenir informé de l'avancement de la fabrication des guides de coupes.



DISTRIBUTEURS
 DISTRIBUTORS