

EUROBONE 2


MODE D'EMPLOI

GRUPE
FH ORTHOTM

1 TRANSFERT DU LIQUIDE DURCISSANT



Ouvrir l'emballage stérile et utiliser le produit dans des conditions aseptiques. Tirer la tige de mélange ainsi que l'embout de piston vers l'arrière (si celui-ci ne se trouve pas déjà à l'arrière du compartiment à poudre).

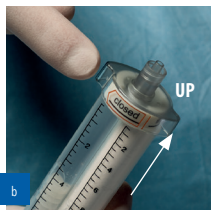

Tourner l'embout de la seringue vers le haut.



Placer l'anneau de sélection de la seringue sur « transfert » (transfer) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Tourner l'embout de la seringue vers le bas, attacher la tige poussoir au piston du compartiment du liquide durcissant.




Appuyer dessus jusqu'à ce que tout le liquide soit transféré dans le compartiment contenant la poudre.

2 MÉLANGE POUDRE + LIQUIDE DURCISSANT



Toujours en position « transfer ».

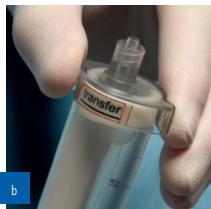

Pour mélanger la poudre et le liquide durcisseur, tenir la seringue d'une main tout en tenant l'extrémité du piston mélangeur de l'autre main et faire tourner ce dernier en effectuant un mouvement de gauche à droite répété pendant deux (2) minutes de façon à obtenir un mélange uniforme. **IMPORTANT** : il faut s'assurer que le produit est bien mélangé aux deux extrémités. Le produit ne peut pas être injecté s'il n'est pas bien mélangé.



Il faut veiller à bien aller jusqu'au bout des deux extrémités du compartiment à poudre. Il est possible qu'une petite quantité de poudre s'échappe par l'embout de piston au début de l'opération de mélange. Une fois la phase de mélange terminée, faire passer la pâte vers l'extrémité opposée au côté de l'injection de façon à ce que l'air soit prêt à être expulsé quand l'injection débutera.

3 INJECTION



Tirer doucement la tige de mélange vers le bas afin d'exposer toute sa longueur. Retirer la tige poussoir du compartiment de liquide et l'attacher sur la tige de mélange. L'ensemble tige de mélange + tige poussoir peut à présent être utilisé comme piston d'injection.



Placer l'anneau de sélection de la seringue sur « injecter » (inject) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Tenir la seringue à la verticale, avec son embout tourné vers le haut. Appuyer lentement sur le piston d'injection afin d'expulser l'air (utiliser une compresse de gaze pour éviter toute projection du produit) jusqu'à ce que le produit commence à sortir. Si nécessaire, attacher la canule à l'embout de la seringue et appuyer sur le piston d'injection afin d'expulser l'air (utiliser une compresse de gaze pour éviter toute projection du produit) jusqu'à ce que le produit commence à sortir et injecter EUROBONE 2 STD. Essayer d'effectuer l'injection en une seule fois et de jeter le reste.

Référence	Libellé	Forme	Temps de préparation	Temps d'injectabilité	Temps de prise
263 666	EUROBONE 2 STD 8 cc	Seringue + canule	2 min	2 min	8 min



DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

GRUPE
FH ORTHOTM

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fortho.com
www.fortho.com

USA, FH ORTHOPEDICS INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fortho-us.com
www.fortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fortho.com