

Knee+ 1.6

Technique opératoire

A new vision for computer assisted orthopedic surgery.



Seulement **3 étapes** avant la navigation du guide de coupe :



0

Installation du bandeau 1.6
Nettoyage de l'objectif de la caméra

Calibration de l'accéléromètre

Configuration du Wi-Fi
Personnalisation du protocole clinique




PLEASE CLEAN THE LENS
BEFORE EACH SURGERY
MICROFIBER WIPE ONLY




1

Choix du côté a opérer

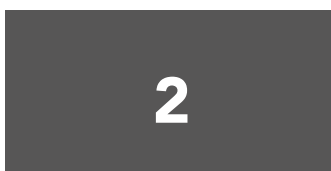


2

Fixation de la référence osseuse

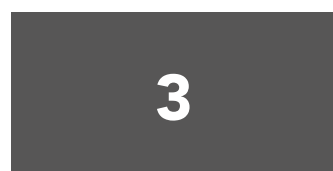



3

Acquisition des repères anatomiques

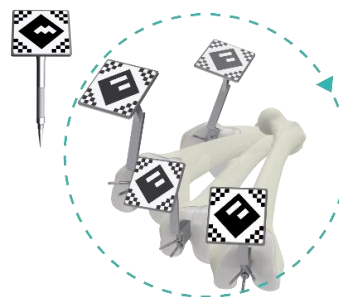


4

Navigation du guide de coupe

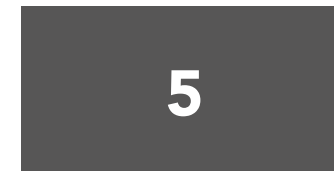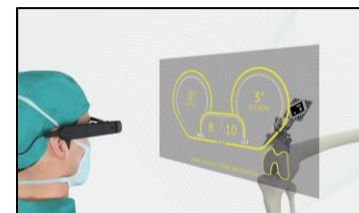

5

Envoi du rapport chirurgical

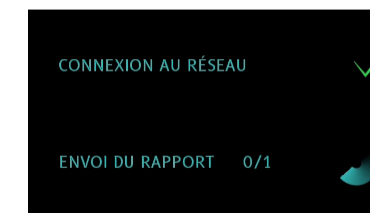




La caméra VUZIX M400 filme lors de cette étape



La caméra externe prend le relais sur la VUZIX M400 dès cette étape

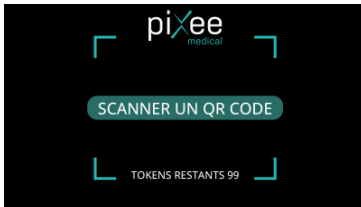

Calibration de l'accéléromètre


Démarrage de Knee+


Vérification des numéros de série

Configuration du protocole

Sélection de la jambe à opérer

Assemblage des instruments


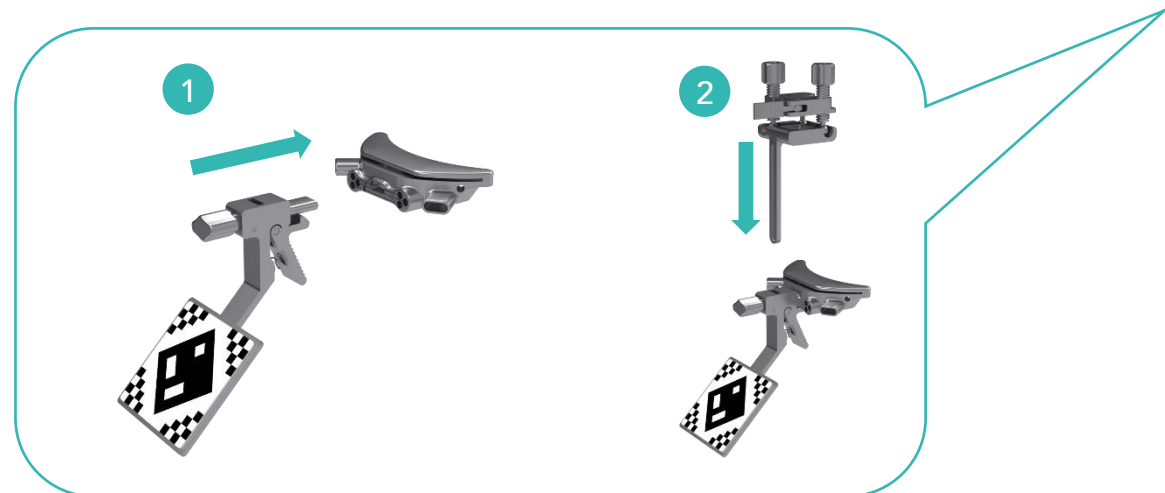




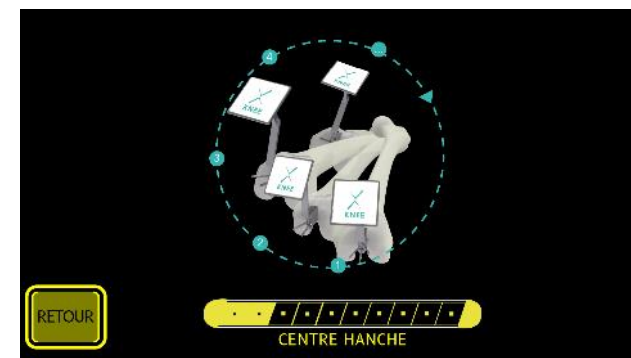


Installation du pointeur
modulaire

Fixation de la référence osseuse sur le fémur

Acquisition des repères anatomiques
du fémur

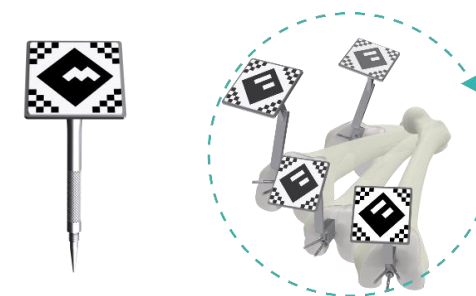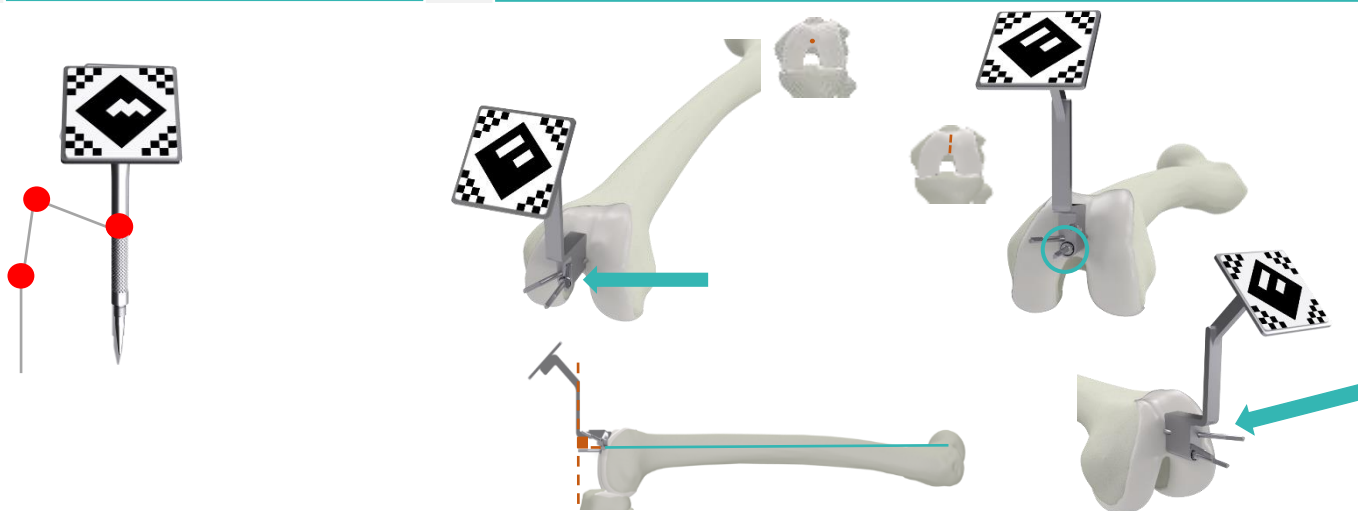


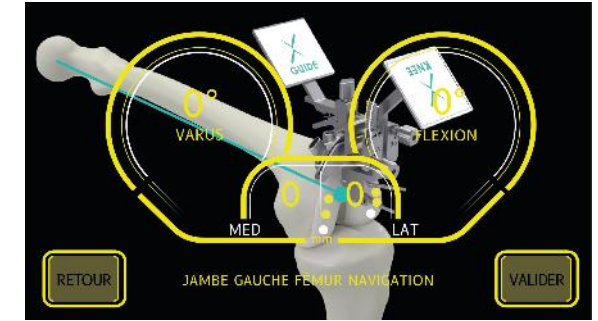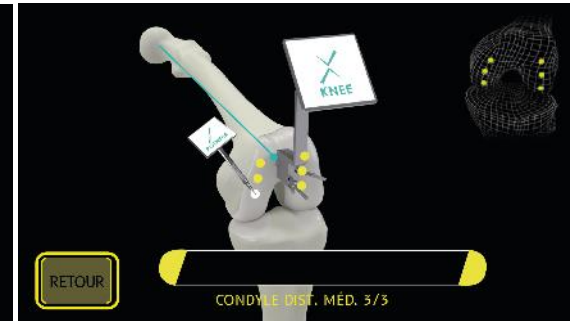
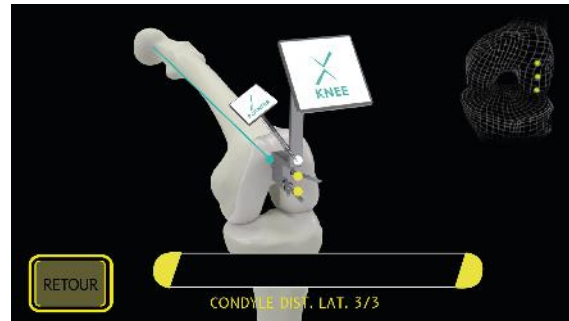


Désassemblage du pointeur modulaire

Acquisition des repères anatomiques sur les condyles latéraux et médiaux

Navigation du guide de coupe

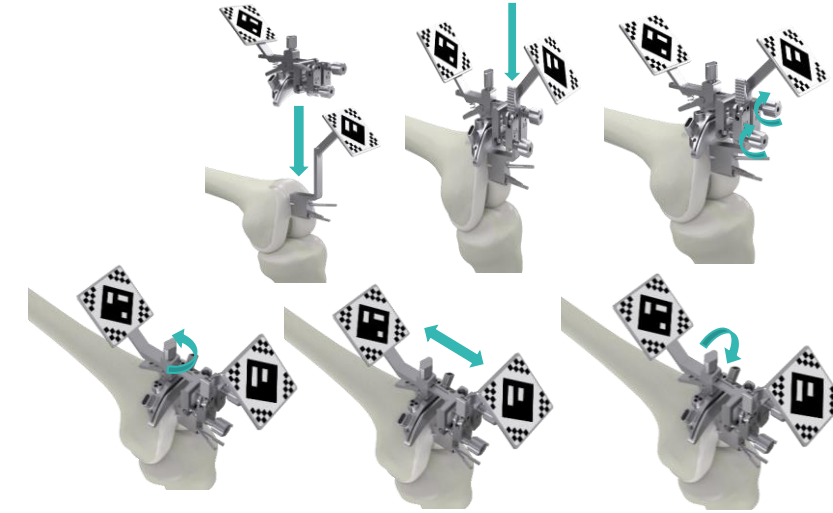

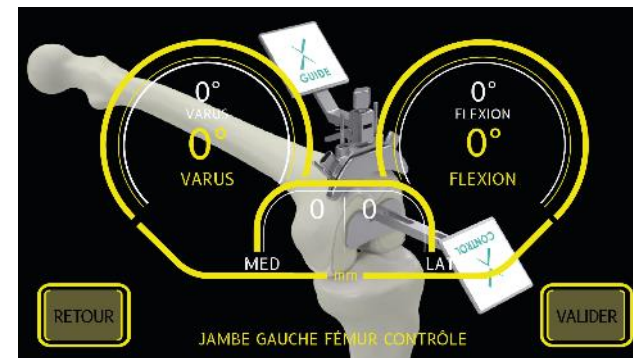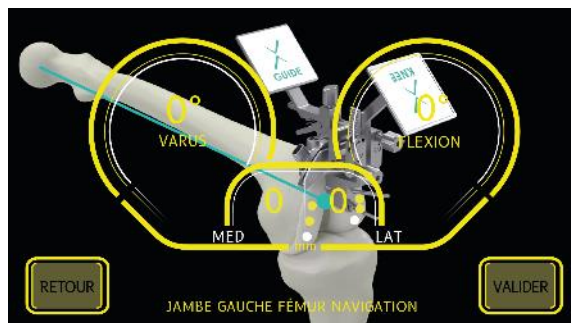

Navigation







Coupe fémorale distale

Contrôle de la coupe fémorale distale



...

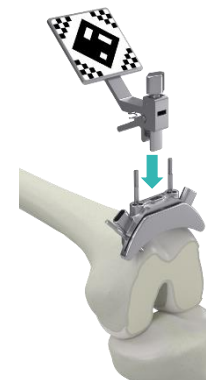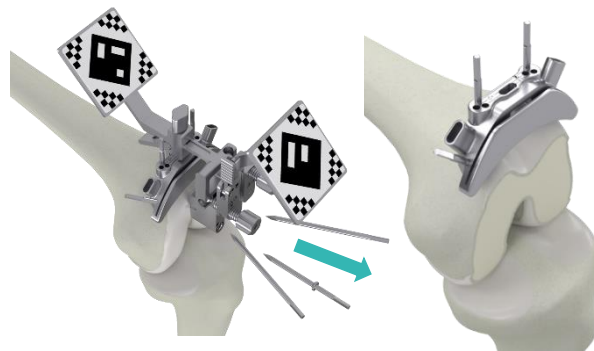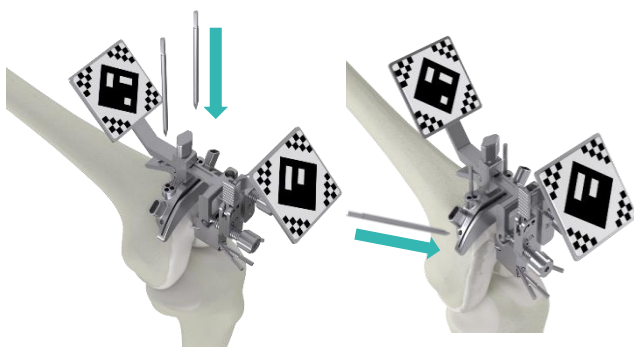


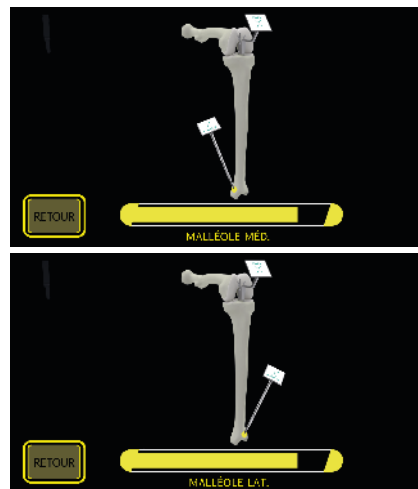





Fixation de la référence osseuse

Assemblage du pointeur modulaire

Acquisition des malléoles

Désassemblage du pointeur modulaire

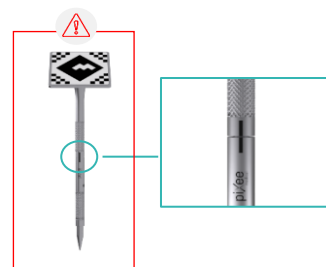
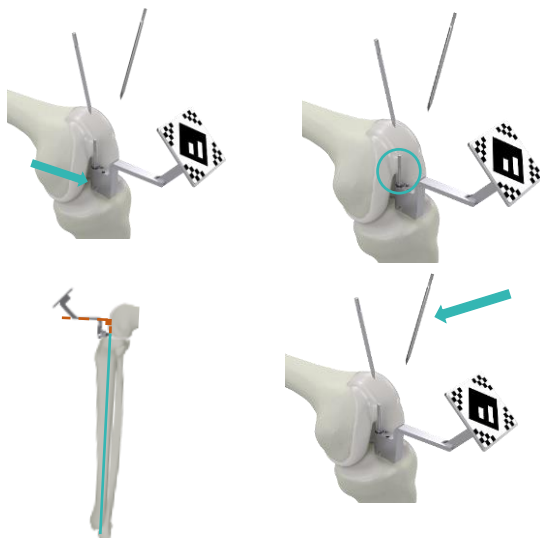


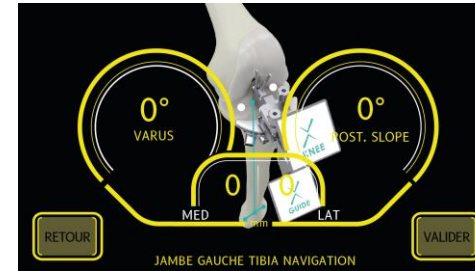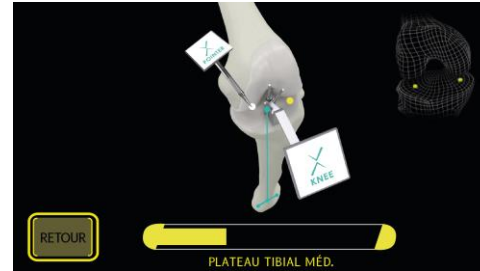
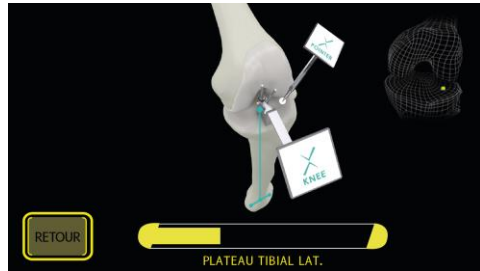


Acquisition du point le plus distal du plateau tibial latéral

Acquisition du point le plus distal du plateau tibial médial

Navigation du guide de coupe

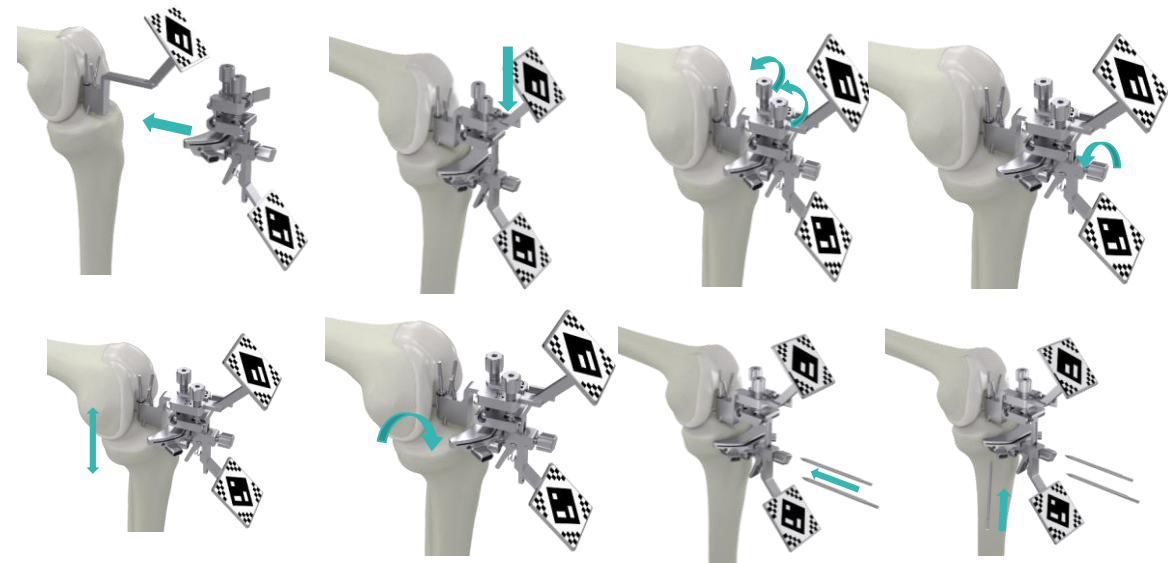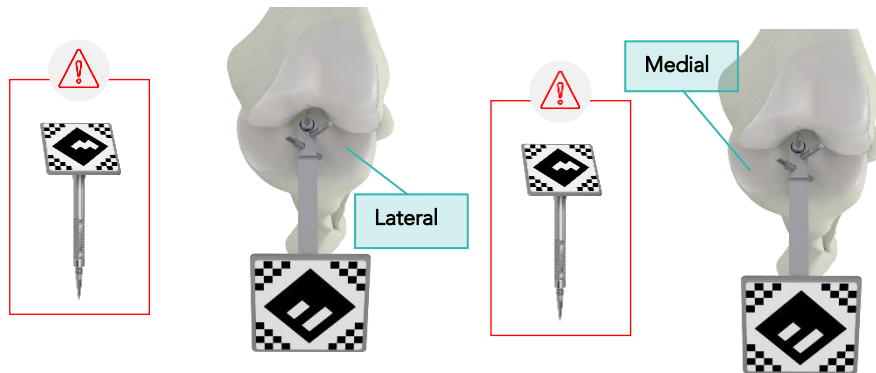

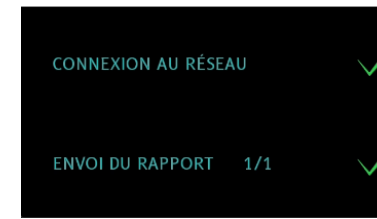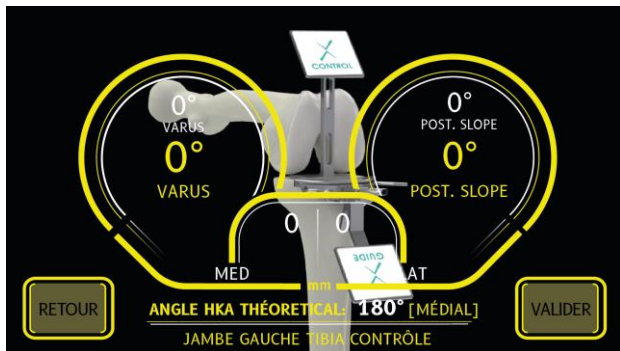

Contrôle de la coupe tibiale proximale



Fin du protocole




Confirmation de l'adresse mail



Confirmation de l'envoi du rapport

Retour automatique sur la page d'accueil

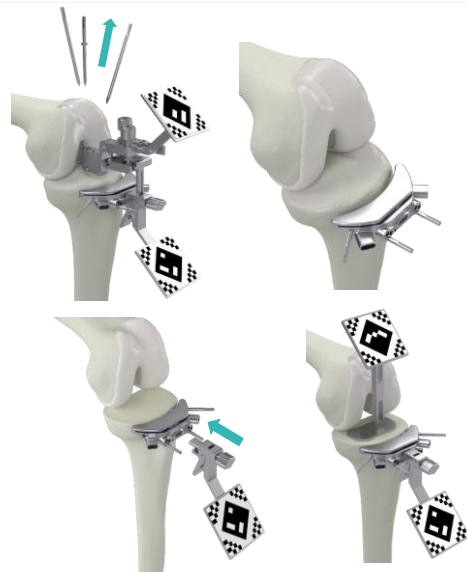

Pour plus d'informations sur le report des comptes rendus opératoires, veuillez vous référer à la diapositive : Comment reporter les rapports chirurgicaux après une chirurgie ?



A new vision for computer
assisted orthopedic surgery.



+33 (0)4 58 10 13 65



contact@pixee-medical.com



PIXEE MEDICAL
Temis Innovation
18, rue Alain Savary
25000 BESANCON
France